


ひとりひとりの 安心と清潔のために…

菌に厳しく、器具に優しい 120℃*・4分*・オイル殺菌

素材へのダメージを最小限に抑えながら
タービンヘッドの内部まで殺菌洗浄が行えます。

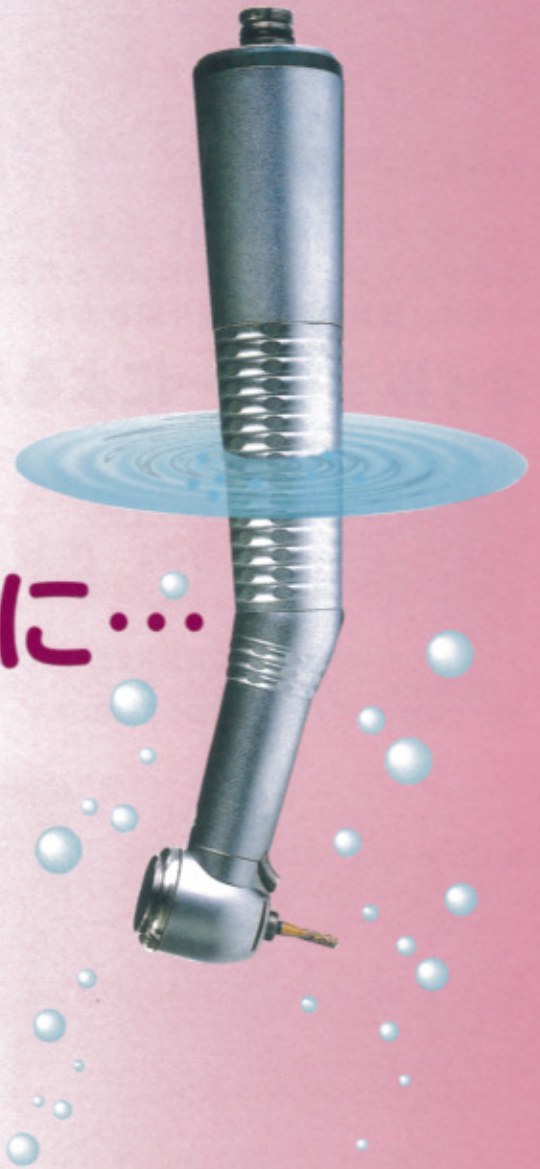

ハンドピースの殺菌洗浄をより簡単に、より確実に…
高温オイル殺菌洗浄器

オイルライザー[®] OL-200N

院内感染の防止には患者さんごとのハンドピースの殺菌が欠かせません。そのために、できるだけ効率的に行え、素材の劣化を招かない方法が求められています。オイルライザーは熱媒体に専用オイルを使用した殺菌洗浄器。水や高熱蒸気を使わないため錆や腐食等のダメージも少なく、器具の殺菌洗浄が簡単に行えます。また、殺菌の完了を音声で知らせるので、患者さんの院内感染に対する不安を解消する効果も期待できます。

- スタートスイッチひとつで、すべての工程が全自動
- 殺菌工程が表示ランプとアイコンで確認できる安心設計
- 殺菌の完了を音声で知らせ、「安心」を患者さんにアピール
- 音声の音量を自由に変えられる音量調節機構を標準装備
- 電源スイッチをONにして保温状態にしたまま連続使用が可能
- ハンドピースで一度に約5本、パーヤリーマーの殺菌洗浄も可能

■オイル120℃熱処理における加熱時間と生存菌の有無

菌種	処理前	1分	2分	3分	4分
黄色ブドウ球菌	+++	+	-	-	-
大腸菌	+++	+	-	-	-

(+++：高度の発育 +：低度の発育 -：発育なし)
上記のデータはハンドピースを用いた殺菌試験結果による。
殺菌データ提供：神奈川歯科大学 感染制御学講座微生物学分野 教授 梅本俊夫
神奈川歯科大学 健康科学講座口腔保健学分野 教授 荒川浩久

新型・全自動
音量調節機構付



「ヒュー」消菌を完了しました」殺菌の完了を音声で知らせます。

- 仕様
- 外形寸法：(幅)200×(奥行)195×(高さ)230mm
 - 本体重量：約3.4kg
 - 電源：AC100V 2A 50/60Hz
 - 消費電力：200W
 - 製造販売届出番号：13B1X00140000002






ハンドピース殺菌洗浄の流れを変える!

高温オイル殺菌洗浄器 **オイルライザー**[®] OL-200N

オイルライザーは、約120℃*に加熱された専用オイルにハンドピース等を浸漬することにより、器具に付着した有害な微生物を約4分*で死滅させると共に、器具の汚れを取り除きます。



オイルライザーによるハンドピース殺菌洗浄の5つのメリット

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  <p>1
スピーディ</p> <p>スタートボタンを押すだけの簡単操作。わずか約4分*で殺菌できます。</p> |  <p>2
確実</p> <p>殺菌温度を約120℃*に設定。タービンヘッドの内部まで殺菌します。</p> |  <p>3
低ダメージ</p> <p>素材への影響に配慮した殺菌条件によりダメージを最小限に抑えます。</p> |  <p>4
洗浄</p> <p>加熱された専用オイルにより器具の汚れを取り除きます。</p> |  <p>5
アピール</p> <p>殺菌の完了を音声で知らせるため、患者さんに「安心」をアピールします。</p> |
|--|--|--|--|---|

- ハンドピースで一度に約5本収納でき、バーやリーマー等の殺菌洗浄にも利用できる汎用性の高いバスケット
- オイルの加熱、保温を的確に行える消毒槽
- オイルの量が一目でわかるオイルレベルゲージ付小窓
- オイルの排出に便利なドレンバルブ
- ONの状態加熱、保温状態を維持する電源スイッチ
- 殺菌の完了を音声で知らせるスピーカー
- 音声の音量が自由に変えられる音量調節つまみ
- 殺菌洗浄済の器具を一時的にレストして冷ますためのコップ受
- 殺菌の工程が一目でわかるアイコン・表示ランプ
- 適正温度にならないと殺菌洗浄を開始しない安心設計のスタートボタン

■専用オイルの特長

専用オイルは、化学的安定性に優れ、生体への有害性もなく安心です。また、さらりとした手触りで、拭き取りやすいのも特長です。

■適用上のご注意

本品で殺菌洗浄可能なエアタービンハンドピースは、オートクレーブ滅菌対応のボールベアリング方式のものです。

●オートクレーブ滅菌不可、及びエアベアリング(ノーベア)方式のエアタービンハンドピース等には本品を使用しないでください。

注) *記載の数値は殺菌に係わる標準温度・標準時間で、温度上昇等にかかる時間(約10分)は含まれません。電源スイッチをONにして保温状態にしたまま連続使用の場合は、記載の数値でご使用いただけます。

*予告なしに本商品の外観・仕様等を変更することがありますので、予めご了承ください。

*「オイルライザー」は、株式会社セキムラの登録商標です。



●専用オイル
NET.500ml
NET.1000ml

●院内用ボスター 患者さんへの説明にご利用いただけます。

患者さんの安心と清潔のために...

当品では、高温オイル殺菌洗浄器により患者様ごとに器具用ハンドピース等治療器具を内部まで殺菌洗浄し、院内感染の防止に努めております。