

RISTOGEN

歯科用小器具防錆・除菌洗浄液

リストゲン

1本/4L 定価11,500円(税別) 1本/2L 定価6,000円(税別)

器具を守る3つの効果

簡単清浄

安心防錆

強力除菌

BENEFITS

優れた清浄作用：強い溶解力で、血液や脂肪等を速やかに除去

強い防錆力：防錆剤配合により錆びやすい器具を発錆から保護

高い除菌効果：広範囲な除菌作用をもつN-アルキルアミノプロピルグリシンを配合

低刺激性：皮膚や粘膜に対する刺激性がほとんどなく安心

選べる希釈倍率：原液2~50倍・100倍の範囲で希釈して使用可能


幅広い用途：歯科用小器具類・インスルツメント・排唾管・バキューム等の洗浄に使用可能

エコロジー仕様の容器：コンパクトにつぶせて廃棄できる容器を採用




〈防錆効果比較試験〉※被験物質：スチールバー

左から順番に「食塩水1%溶液」「水道水」「次亜塩素酸ナトリウム0.5%溶液」「リストゲン5倍希釈」

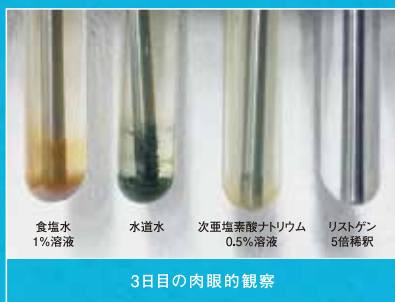

食塩水 1%溶液 水道水 次亜塩素酸ナトリウム 0.5%溶液 リストゲン 5倍希釈

3日目の肉眼的観察

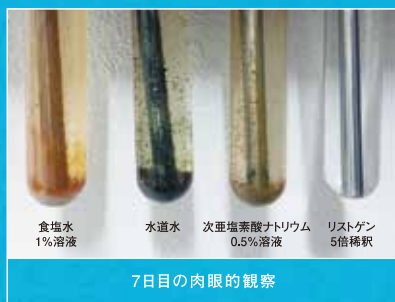

食塩水 1%溶液 水道水 次亜塩素酸ナトリウム 0.5%溶液 リストゲン 5倍希釈

7日目の肉眼的観察

〈浸漬洗浄による防錆効果〉

リストゲン5倍希釈液、及び50倍希釈液に各々の被験物質を浸漬し室温にて、錆の発生を肉眼で観察し防錆効果を試験した。

試験液	被験物質	1日	2日	3日
リストゲン5倍希釈液	バー	-	-	-
	ミラー(歯鏡)	-	-	-
リストゲン50倍希釈液	スケーラー	-	-	-

〈拭拭洗浄による防錆効果〉

リストゲン5倍希釈液を湿した布で各々の被験物質を拭拭して、錆の発生を肉眼で観察し防錆効果を試験した。

試験液	被験物質	1日	2日	3日
リストゲン50倍希釈液	バー	-	-	-
	ハンドピース	-	-	-



超音波洗浄器 プロソニックPS-300 との併用をおすすめします。 定価298,000円(税別)

〈使用法〉

歯科用小器具類の場合(バー・リーマー・クレンザー・ファイル等)

- ・浸漬洗浄/本液：原液、又は2~5倍に希釈 浸漬時間：10分以上
- ・拭拭洗浄/本液：原液、又は2~5倍に希釈 拭拭方法：ガーゼ、又は布で拭拭
- ・超音波洗浄/本液：5倍以下に希釈 洗浄時間：5分以上

器具類の場合(ミラー・スケーラー・ピンセット類のインスルツメント)

- ・浸漬洗浄/本液：ひどい汚れの場合は原液、又は2~30倍に希釈 ※通常の汚れの場合は30~50倍に希釈 浸漬時間：30分間時間
- ・超音波洗浄/本液：100倍に希釈 洗浄時間：15分以上
- ・排唾管、バキューム等の洗浄/本液：30~50倍希釈液(コップ1杯分を吸引) 放置時間：8時間以上(放置後、水を十分に吸引)