





カートリッジ方式
エチレンオキサイドガス滅菌器

CT-190C

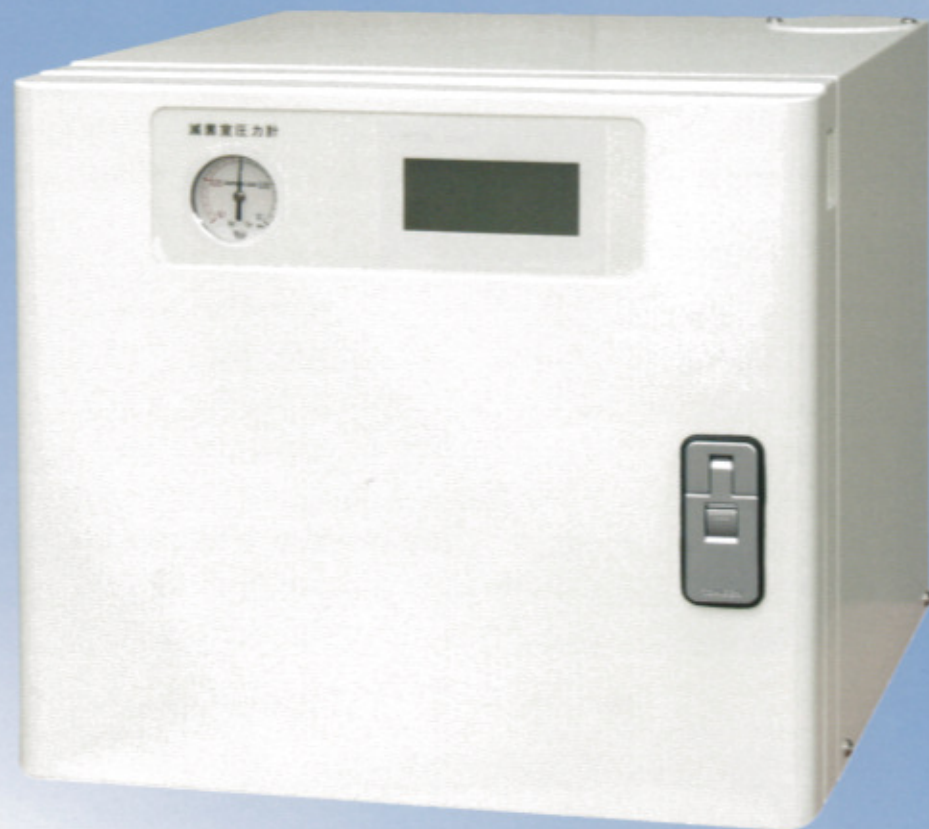

■設置図

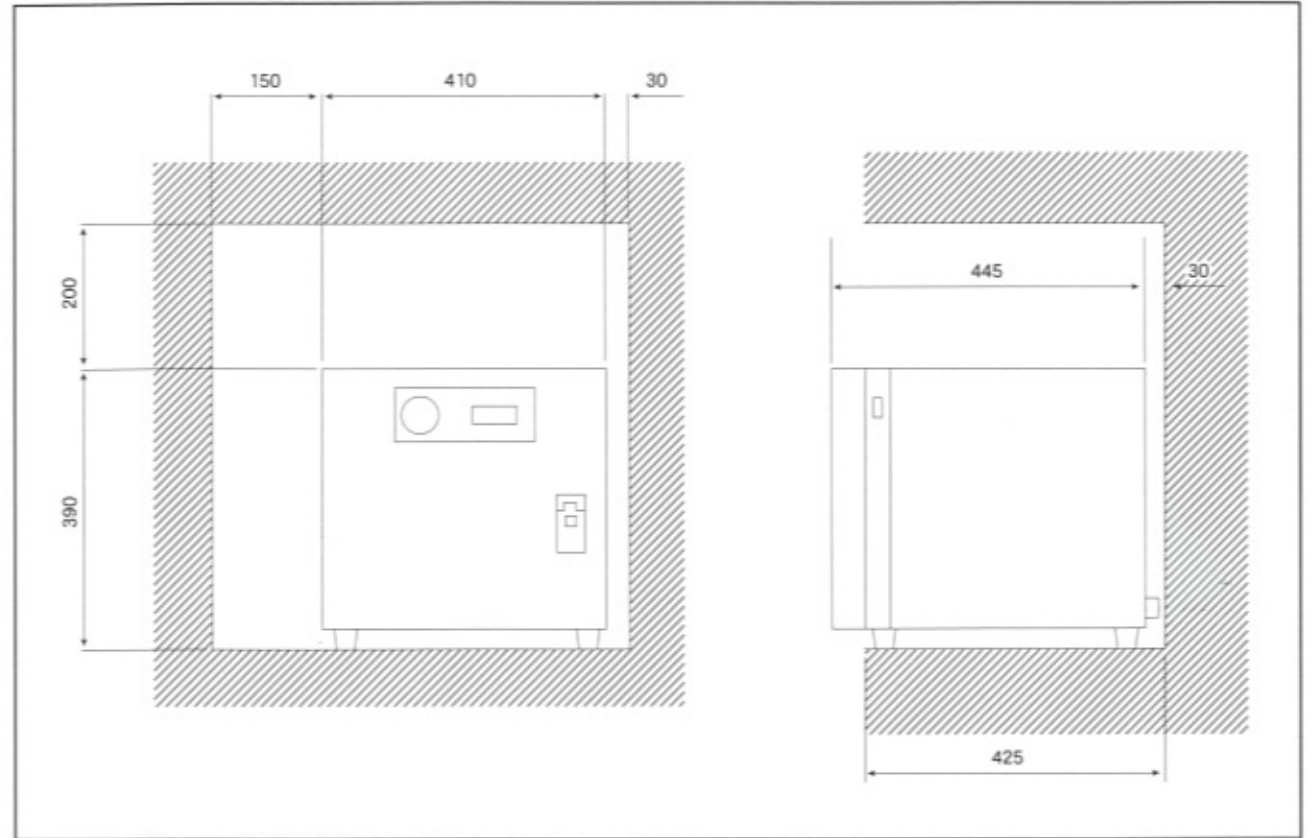

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 滅菌ガスは、専用滅菌ガスをご使用ください。指定以外の滅菌ガスを使用されますと、爆発したり、装置の故障や滅菌不良が発生する恐れがあります。
- 電源は必ず交流100V 15A アース付の専用コンセントに接続してください。
- 滅菌状態の管理は必ず行ってください。日常的にはケミカルインジケータを定期的にはバイオロジカルインジケータをご使用ください。
- 標準設定値以外のご使用の場合は、必ず滅菌試験にて滅菌条件が十分であることを確認してご使用ください。
- ポリ塩化ビニール製で放射線滅菌した物の再滅菌は毒性物質の残留が多くなるためガス滅菌には適しません。
- 滅菌に使用する酸化エチレンガスは、毒性があり、可燃性です。取扱やガスの排気には十分注意が必要です。
- ・本装置を設置に使用する部屋には、換気扇を設けてください。
- ・本装置及び専用カートリッジは、40℃以下の場所にて、設置・管理してください。
- ・本装置に使用する滅菌ガスは可燃性ですので周囲は火気厳禁としてください。


ToHo 株式会社 東邦製作所

- 本 社 〒351-0036 埼玉県朝霞市北原1-10-14
TEL 048-474-2151 FAX 048-474-2155
- 埼玉営業所 TEL 048-474-2151 ●広島営業所 TEL 082-273-2377
- 東京営業所 TEL 03-5689-5171 ●福岡営業所 TEL 092-573-0951
- 大阪営業所 TEL 06-6395-3851 ●名古屋出張所 TEL 052-501-4394
- 松山営業所 TEL 089-922-6284
- 製造元 ●鹿島工場 〒314-0254 茨城県神栖市太田4266-5
TEL 0479-46-2571 FAX 0479-46-2573

■取扱店

お問い合わせ先
(株)セキムラ 本社/東京都板橋区志村 1-28-1
フリーダイヤル ☎0120-106-418

実用的な機能を搭載。簡単に操作できて、安心です。

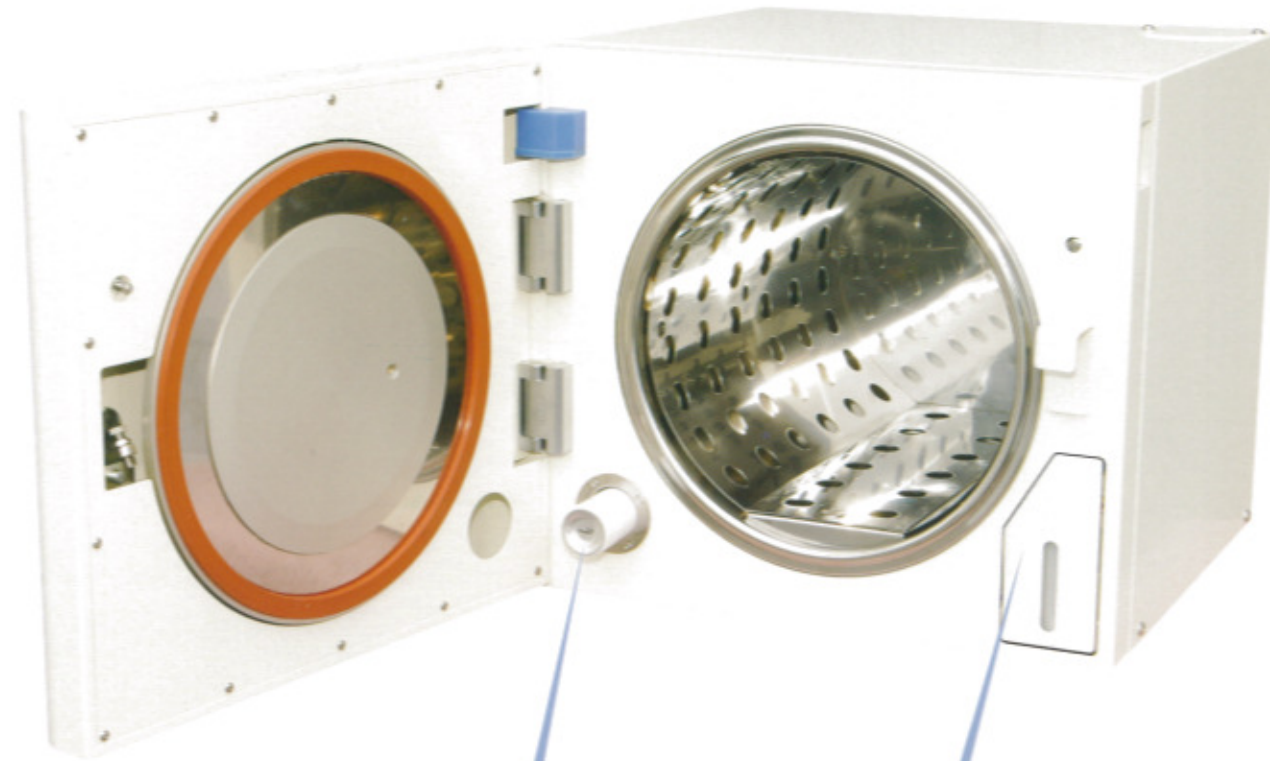

ポンペを差し込むだけの簡単操作



加温ボトル
水量100cc

■主な特徴

①カートリッジポンベ方式

従来のポンペを開閉する煩わしさから解放されました。

②カートリッジポンベ認識装置

器種ごとの専用ポンペを自動認識するので、誤挿入によるトラブルがありません。

③チャンバ内の湿度をオートコントロール

チャンバ内に自動で給水します。

④タッチパネル搭載

画面を見ながらタッチするので操作が簡単です。

⑤エアレーション工程保持機能

完了しても缶内の残留ガスを除去するため、エアレーションを続行します。

⑥プリンターに記録(オプション)


オプションでプリンターを装備することにより、日常のモニタリングと管理ができます。

■オプション
●外置きプリンター



プリンター印字内容

| 測定日 | 缶内温度 | 缶内圧力 | エラー履歴 |
|------------|------|-------|-------|
| 10/05/07 | 55.0 | 0.00 | |
| 14:36:01 | 45.5 | 0.00 | |
| 2 15:01:09 | 35.0 | -0.09 | |
| 3 15:07:59 | 35.1 | -0.08 | |
| 4 15:37:59 | 35.7 | -0.02 | |
| 4 15:47:59 | 35.3 | -0.09 | |
| 4 15:57:59 | 34.0 | -0.02 | |
| 4 16:07:59 | 35.7 | -0.08 | |
| 4 16:17:59 | 35.3 | -0.08 | |
| 4 16:27:59 | 34.0 | -0.08 | |
| 4 16:37:59 | 35.3 | -0.09 | |

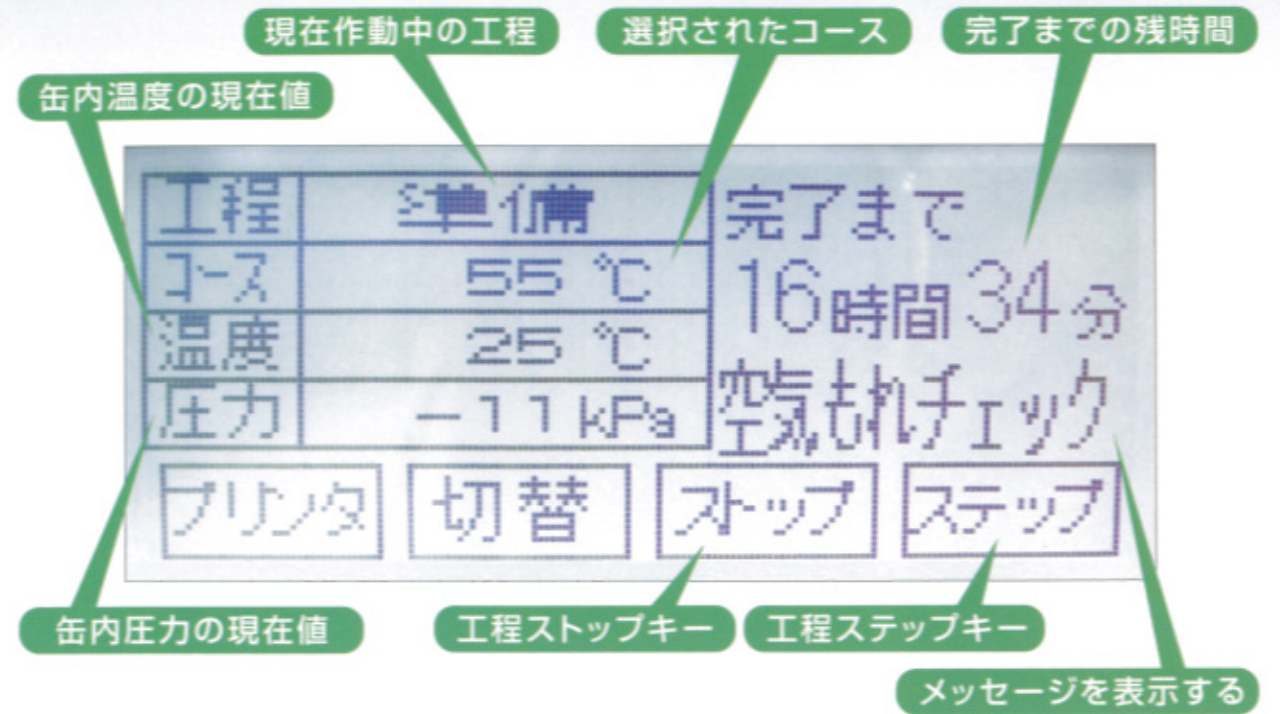

| | |
|--------------|--|
| 販売名 | ケミス・クレーブ CT-190C |
| 外形寸法(mm) | W410×D445×H390 |
| 缶体寸法(mm) | φ260×奥行353 |
| 缶体内容量 | 19L |
| 作用(滅菌)温度(℃) | 55℃/40℃ |
| 作用(滅菌)時間 | 3時間(標準時間)/5時間(標準時間) |
| 洗浄回数 | 標準10回(1回~99回まで可変) |
| エアレーション時間 | 標準12時間(1~48時間まで可変) |
| 常用圧力(MPa) | 大気圧~-0.076MPa |
| 安全装置 | 過圧防止回路、自己診断機能、カートリッジ誤挿入防止機能 過熱防止回路、ガス漏れチェック機能 |
| 電源 | AC100V 15A 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 200W |
| 本体(キャビネット)質量 | 38kg |
| EMC(電磁両立性) | 適合(JS C 1806-1:2001) |
| 一般的名称 | エチレンオキシドガス滅菌器 |
| 医療機器クラス分類 | 管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 |
| 製造認証番号 | 221AGBZX00197000 |
| 医療機器製造販売許可番号 | 0882X10003 |

■オプション

●台車(N-22)
W540×D500×H800(mm)



●バスケット
B-U320
W230×D325×H120(mm)



●専用カートリッジ
エルナックS-95 15g
医療用医薬品
成分:酸化エチレン95v/v%以上
二酸化炭素:適量

