

# ひとりひとりの 安心と清潔のために…

## 菌に厳しく、器具に優しい 120℃\*・4分\*・オイル殺菌

素材へのダメージを最小限に抑えながら  
タービンヘッドの内部まで殺菌洗浄が行えます。



ハンドピースの殺菌洗浄をより簡単に、より確実に…  
高温オイル殺菌洗浄器

## オイルライザー<sup>®</sup> OL-200N

院内感染の防止には患者さんごとのハンドピースの殺菌が欠かせません。そのために、できるだけ効率的に行え、素材の劣化を招かない方法が求められています。オイルライザーは熱媒体に専用オイルを使用した殺菌洗浄器。水や高熱蒸気を使わないため錆や腐食等のダメージも少なく、器具の殺菌洗浄が簡単に行えます。また、殺菌の完了を音声で知らせるので、患者さんの院内感染に対する不安を解消する効果も期待できます。

- スタートスイッチひとつで、すべての工程が全自動
- 殺菌工程が表示ランプとアイコンで確認できる安心設計
- 殺菌の完了を音声で知らせ、「安心」を患者さんにアピール
- 音声の音量を自由に変えられる音量調節機構を標準装備
- 電源スイッチをONにして保温状態にしたまま連続使用が可能
- ハンドピースで一度に約5本、パーヤリーマーの殺菌洗浄も可能

■オイル120℃熱処理における加熱時間と生存菌の有無

菌種	処理前	1分	2分	3分	4分
黄色ブドウ球菌	+++	+	-	-	-
大腸菌	+++	+	-	-	-

(+++：高度の発育 +：低度の発育 -：発育なし)  
上記のデータはハンドピースを用いた殺菌試験結果による。  
殺菌データ提供：神奈川歯科大学 感染制御学講座微生物学分野 教授 梅本俊夫  
神奈川歯科大学 健康科学講座口腔保健学分野 教授 荒川浩久

新型・全自動  
音量調節機構付



「ヒュー」消菌を完了しました」殺菌の完了を音声で知らせます。

- 仕様
- 外形寸法：(幅)200×(奥行)195×(高さ)230mm
  - 本体重量：約3.4kg
  - 電源：AC100V 2A 50/60Hz
  - 消費電力：200W
  - 製造販売届出番号：13B1X00140000002

# ハンドピース殺菌洗浄の流れを変える!

## 高温オイル殺菌洗浄器 **オイルライザー**<sup>®</sup> OL-200N

オイルライザーは、約120℃\*に加熱された専用オイルにハンドピース等を浸漬することにより、器具に付着した有害な微生物を約4分\*で死滅させると共に、器具の汚れを取り除きます。



### オイルライザーによるハンドピース殺菌洗浄の5つのメリット



**1 スピーディ**  
スタートボタンを押すだけの簡単操作。わずか約4分\*で殺菌できます。



**2 確実**  
殺菌温度を約120℃\*に設定。タービンヘッドの内部まで殺菌します。




**3 低ダメージ**  
素材への影響に配慮した殺菌条件によりダメージを最小限に抑えます。



**4 洗浄**  
加熱された専用オイルにより器具の汚れを取り除きます。



**5 アピール**  
殺菌の完了を音声で知らせるため、患者さんに「安心」をアピールします。

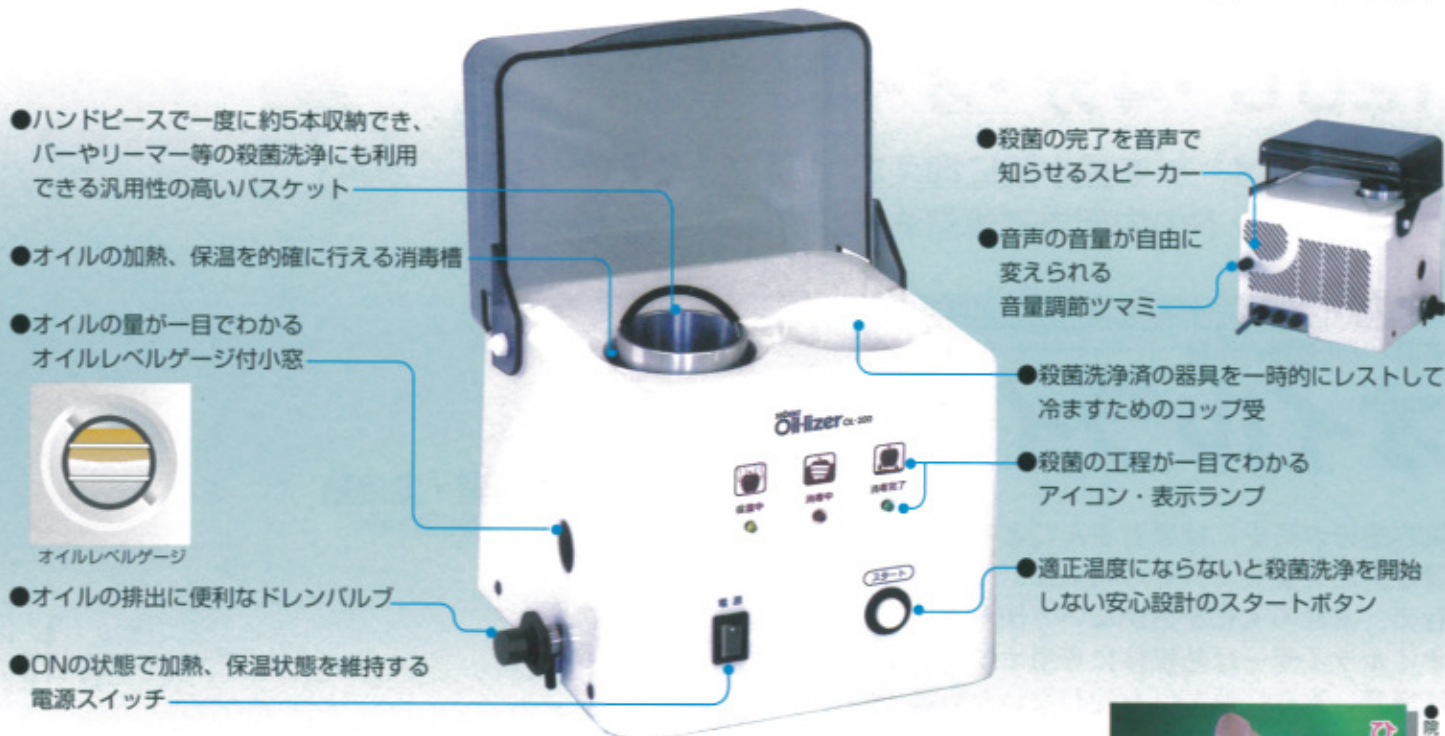

●ハンドピースで一度に約5本収納でき、バーやリーマー等の殺菌洗浄にも利用できる汎用性の高いバスケット

●オイルの加熱、保温を的確に行える消毒槽

●オイルの量が一目でわかるオイルレベルゲージ付小窓



オイルレベルゲージ

●オイルの排出に便利なドレンバルブ

●ONの状態加熱、保温状態を維持する電源スイッチ

●殺菌の完了を音声で知らせるスピーカー

●音声の音量が自由に変えられる音量調節つまみ

●殺菌洗浄済の器具を一時的にレストして冷ますためのコップ受

●殺菌の工程が一目でわかるアイコン・表示ランプ

●適正温度にならないと殺菌洗浄を開始しない安心設計のスタートボタン

#### ■専用オイルの特長

専用オイルは、化学的安定性に優れ、生体への有害性もなく安心です。また、さらりとした手触りで、拭き取りやすいのも特長です。

#### ■適用上のご注意

本品で殺菌洗浄可能なエアタービンハンドピースは、オートクレーブ滅菌対応のボールベアリング方式のもので、

●オートクレーブ滅菌不可、及びエアベアリング(ノーベア)方式のエアタービンハンドピース等には本品を使用しないでください。

注) \*記載の数値は殺菌に係わる標準温度・標準時間で、温度上昇等にかかる時間(約10分)は含まれません。電源スイッチをONにして保温状態にしたまま連続使用の場合は、記載の数値でご使用いただけます。

\*予告なしに本商品の外観・仕様等を変更することがありますので、予めご了承ください。

\*「オイルライザー」は、株式会社セキムラの登録商標です。



●専用オイル  
NET.500ml  
NET.1000ml



●院内用ボスター 患者さんへの説明にご利用いただけます。



オイルライザー

製造販売元  明日の医療に奉仕する  
**株式会社セキムラ**  
SEKIMURA 会社